



V A H L K A M P

HANDLEIDING

Bedalarm met strip

Voor meer informatie:



V A H L K A M P

Voor Nederland:

Wilhelminalaan 1, 5707 BS Helmond

Telefoon: 0492- 52 89 75 • Fax: 0492 - 55 36 97

E-mail: info@vahlkamp.nl • Website: www.vahlkamp.nl

Voor België:

Postbus 61, 3960 Bree • Telefoon: 011 - 632 770

GARANTIE

Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik van dit product. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd.

Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, breuk, vallen, demontage, brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige reparatie vallen niet onder de garantie. Batterijen vallen niet onder de garantie.

In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de reparatie zal verzorgen.

STORINGSWIJZER.

Opmerking:

Opmerking : Belangrijk is dat de Bedstrip niet gevouwen wordt; ook bij verstelbare bedden dient daar rekening mee gehouden te worden.

Controleer bij niet functioneren eerst of de pluggen goed bevestigd zijn, de schakelaar op de AAN-stand staat en de LED groen brandt.

1. Kennismaking

Zojuist is het bedrade Bedalarm met strip van Vahlkamp in ontvangst genomen. Bijgaand geven wij een overzicht voor installatie en gebruik, maar eerst zetten wij een aantal voordelen op een rij.

PLUSPUNTEN

Behalve het hoofddoel, het alarmeren via het (bestaande) oproepsysteem indien het bed verlaten wordt, kent het Bedalarm de volgende pluspunten:

Instelmogelijkheid tijd.

De intervaltijd tussen het verlaten van het bed en het doorgeven van het signaal aan het oproepsysteem is instelbaar. Deze intervaltijd kent een keuzemogelijkheid tussen direct, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 15 min.

Uitgebreide testmogelijkheid.

De schakelaar wordt AAN gezet: LED licht even rood op en wordt vervolgens groen.

Als er contact gemaakt wordt met de bedstrip dan dooft de LED even, ter controle

Als het contact met de bedstrip wordt verbroken dan gaat de LED gedurende 2 seconden rood branden, ter indicatie dat er alarm gemaakt wordt.


Kortom: er is voortaan een controlemogelijkheid of de activiteit bij de strip wordt gedetecteerd door de ontvangstunit en U kunt controleren of de ontvangstunit stand-by staat.

Onderdelen

Het bestaat uit de volgende onderdelen (zie afbeelding 1):

Ontvangstunit, met aan/uit -schakelaar en instelknop voor de tijd, 220-240Volt adapter en kabel voor aansluiting op het oproepsysteem
Bedstrip, met draad om aan te sluiten op de Ontvangstunit.

De strip (88,4*7,6 cm) kan men het beste in de breedte onder het matras plaatsen.

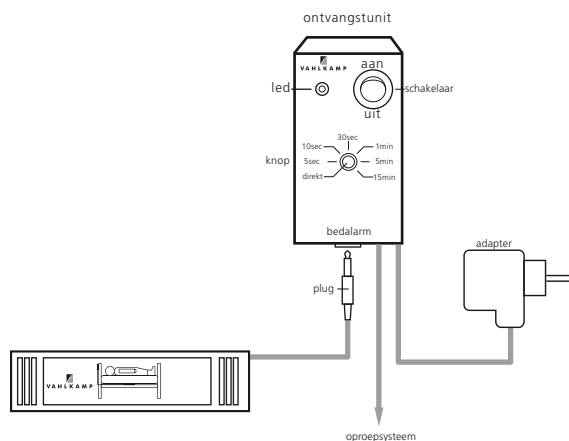

Afbeelding 1: Onderdelen Bedraad Bedalarm met strip

2. Installatie

2.1 Ontvangstunit

Bevestig aan de grijze kabel een plug die geschikt is voor uw oproepsysteem, zoals de plug aan de peerbel of verlengde bel.

De aansluitingen van de grijze kabel zijn als volgt:

- bruin: NO
- groen: NC
- wit: COM

Voorbeeld:

Heeft uw oproepsysteem een maakcontact, sluit dan wit en bruin aan.

Bij een verbreekcontact dient u wit en groen aan te sluiten.

Steek de adapter in een 220-240 Volt wandcontactdoos en verbind de plug met het oproepsysteem. De ontvangstunit kan nu het alarm doorgeven aan het oproepsysteem.

2.2 Bedstrip

De bedstrip dient zodanig in de **BREEDTE** bij de patiënt/bewoner **ONDER** het matras gelegd te worden, dat de gebruiker er in het **MIDDEN** op ligt. Verbind vervolgens de jackplug van de bedstrip met de ontvangstunit. Werk de kabel weg zodat de strip geen belemmering vormt wanneer het bed opgemaakt wordt.

De installatie is nu compleet. Het systeem kan zodra alles aangesloten is getest worden.

2.3 Testen

Het systeem dient op de volgende wijze in gebruik genomen te worden:

Stel de gewenste intervaltijd in. Houdt er rekening mee dat bij gebruik van de directstand het oproepsysteem direct wordt geactiveerd. Wordt deze stand gebruikt bij een patiënt/bewoner die veelvuldig beweegt c.q. omdraait dan bestaat de mogelijkheid dat het oproepsysteem te vaak in werking treedt waardoor een zekere onplettendheid kan ontstaan.

Zet de Ontvangstunit AAN. LED licht even rood op en wordt vervolgens groen.

Wanneer de patiënt/bewoner het bed verlaat dooft de LED even. Na het verstrijken van de ingestelde tijd wordt het oproepsysteem geactiveerd en wordt de LED rood gedurende 2 seconden.

Het Bedalarm is na het activeren van het oproepsysteem direct weer gebruiksklaar. Er hoeft verder niets gedaan te worden om de alarmfunctie opnieuw te activeren.