



**V A H L K A M P**

**HANDLEIDING**

Draadloos Bedalarm met strip

**Voor meer informatie:**



**V A H L K A M P**

**Voor Nederland:**

Wilhelminalaan 1, 5707 BS Helmond

Telefoon: 0492- 52 89 75 • Fax: 0492 - 55 36 97

E-mail: [info@vahlkamp.nl](mailto:info@vahlkamp.nl) • Website: [www.vahlkamp.nl](http://www.vahlkamp.nl)

**Voor België:**

Postbus 61, 3960 Bree • Telefoon: 011 - 632 770



## GARANTIE

Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik van dit product. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd. Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, breuk, vallen, demontage, brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige reparatie vallen niet onder de garantie. Batterijen vallen niet onder de garantie. In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de reparatie zal verzorgen.

## STORINGSWIJZER.

### Opmerking 1:

Belangrijk is dat de Bedstrip niet scherp gebogen wordt.

### Opmerking 2:

Het Draadloos Bedalarm is voorzien van een codenummer (bijvoorbeeld 35-567). De code achterop de zendunit moet corresponderen met de code achterop de ontvangstunit.

### Opmerking 3:

Indien de plug niet aangesloten is op de zendunit kan er geen alarmsignaal doorgegeven worden. Hetzelfde gebeurt als de AAN/UIT-schakelaar in de UIT-stand staat.

### Opmerking 4:

Wanneer de zendunit niet gebruikt wordt dient de schakelaar op de UIT-stand te staan in verband met onnodig batterijverbruik

Controleer bij niet functioneren eerst of de pluggen goed bevestigd zijn en de schakelaar op de AAN-stand staat.

### Is alles correct aangesloten doorloop dan de volgende punten:

LED licht niet op bij het inschakelen van de zendunit:  
de kleine batterij van de zendunit dient verwisseld te worden.

Er wordt geen alarmsignaal doorgegeven en de batterijen zijn in orde:

Zorg dat het bed leeg is

Zet de zendunit van UIT naar AAN.

Licht de LED twee maal op (lang-kort) dan is de strip beschadigd en dient er contact opgenomen te worden met Vahlkamp.

## 1. Kennismaking

Zojuist is het Draadloos Bedalarm met strip van Vahlkamp in ontvangst genomen. Bijgaand geven wij een overzicht voor installatie en gebruik, maar eerst zetten wij een aantal voordelen op een rij.

### PLUSPUNTEN

Behalve het hoofddoel, het alarmeren via het (bestaande) oproepsysteem indien het bed verlaten wordt, kent het Draadloos Bedalarm de volgende pluspunten:

### Instelmogelijkheid tijd.

De intervaltijd tussen het verlaten van het bed en het doorgeven van het signaal aan het oproepsysteem is instelbaar. Deze intervaltijd kent een keuzemogelijkheid tussen direct, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 15 min.

### Uitgebreide testmogelijkheid.

- De schakelaar wordt AAN gezet: de LED licht even rood op
- Er wordt contact met de strip gemaakt: de LED licht even rood op
- Het contact met de strip wordt verbroken: de LED gaat gedurende 5 seconden branden.

Er is dus een controlemogelijkheid of de activiteit bij de strip wordt gedetecteerd door de zendunit.

### Geen hinderlijke snoeren.

Het Bedalarm is draadloos. Het bed kan daarom 5 à 10 meter van het oproepsysteem verwijderd zijn. Ook lopen er geen hinderlijke snoeren over de vloer.

### 1.1 Onderdelen


Het Draadloos Bedalarm bestaat uit de volgende onderdelen (zie afbeelding 1):

**1. Zendunit**, met aan/uit-schakelaar en tijdstelknop.

**2. Ontvangstunit**, met 220-240 Volt adapter en kabel voor aansluiting op het oproepsysteem.

**3. Bedstrip**, met draad om aan te sluiten op de zendunit.

De strip (88,4\*7,6 cm) kan men het beste in de breedte onder het matras plaatsen.

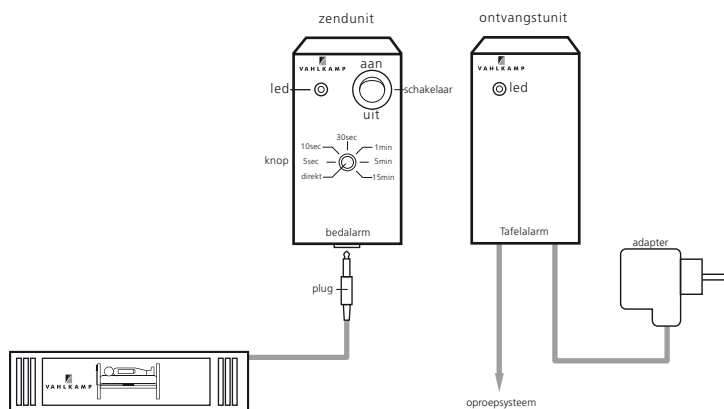

Afbeelding 1: Onderdelen Draadloos Bedalarm met strip

## 2. Installatie

### 2.1 Ontvangstunit

Bevestig aan de grijze kabel een plug die geschikt is voor uw oproepsysteem.

De aansluitingen van de grijze kabel zijn als volgt:

- bruin: NO
- groen: NC
- wit: COM

Heeft uw oproepsysteem een maakcontact, sluit dan wit en bruin aan.  
Bij een verbreekcontact dient u wit en groen aan te sluiten.

Vervolgens dient de ontvangstunit op een vaste plaats aan de muur in de buurt van de oproepaansluiting bevestigd te worden.  
Steek de adapter in een 220-240 Volt wandcontactdoos en verbind de plug met het oproepsysteem. De ontvangstunit kan nu het alarm doorgeven.

### 2.2 Zendunit

Klem de zendunit met behulp van de beugel aan de achterkant van het bed.  
Zorg dat de schakelaar op stand UIT staat.

### 2.3 Bedstrip

De bedstrip dient in de **BREEDTE** richting bij de patiënt/bewoner **ONDER** het matras gelegd te worden, zodat de gebruiker er in het **MIDDEN** op ligt. Verbind vervolgens de jackplug van de bedstrip met de zendunit. Werk de kabel weg zodat de bedstrip geen belemmering vormt bij het opstaan en weglopen van het bed. De installatie is nu compleet.

### 2.4 Testen

Het systeem dient op de volgende wijze in gebruik genomen te worden:

Stel de gewenste intervaltijd in. Houd er rekening mee dat bij gebruik van de directstand het oproepsysteem direct wordt geactiveerd. Wordt deze stand gebruikt bij een patiënt/bewoner die veelvuldig beweegt c.q. omdraait dan bestaat de mogelijkheid dat het oproepsysteem te vaak in werking treedt waardoor een zekere onplettendheid kan ontstaan.

Zet de zendunit AAN. LED licht even rood op en wordt vervolgens groen.

Wanneer de patiënt/bewoner het bed verlaat licht de LED even rood op. Na het verstrijken van de ingestelde tijd wordt het oproepsysteem geactiveerd en knippert de LED rood gedurende 5 seconden.

Het Bedalarm is na het activeren van het oproepsysteem direct weer gebruiksklaar. Er hoeft verder niets gedaan te worden om de alarmfunctie opnieuw te activeren.

N.B. Wanneer de zendunit niet gebruikt wordt dient u de schakelaar in de UIT-stand te zetten in verband met onnodig batterijverbruik.