



V A H L K A M P

HANDLEIDING

Draadloos Vloeralarm

Voor meer informatie:



V A H L K A M P

Voor Nederland:

Wilhelminalaan 1, 5707 BS Helmond

Telefoon: 0492- 52 89 75 • Fax: 0492 - 55 36 97

E-mail: info@vahlkamp.nl • Website: www.vahlkamp.nl

Voor België:

Postbus 61, 3960 Bree • Telefoon: 011 - 632 770

STORINGSWIJZER.

Opmerking 1:

Belangrijk is dat de Vloermat niet gevouwen wordt.

Opmerking 2:

Het Vloeralarm is voorzien van een codenummer (bijvoorbeeld 37-121)

De code achterop de zendunit moet corresponderen met de code achterop de ontvangstunit.

Opmerking 3:

Indien de plug niet aangesloten is op de zendunit kan er geen alarmsignaal doorgegeven worden. Hetzelfde gebeurt als de AAN/UIT-schakelaar in de UIT-stand staat.

Opmerking 4:

Wanneer de zendunit niet gebruikt wordt dient de schakelaar op de UIT-stand te staan in verband met onnodig batterijverbruik

Controleer echter bij niet functioneren eerst of de pluggen goed bevestigd zijn en de schakelaar op de AAN-stand staat.

Is alles correct aangesloten doorloop dan de volgende punten:

De LED licht niet op bij het inschakelen van de zendunit: de kleine batterij van de zendunit dient verwisseld te worden.

Er wordt geen alarmsignaal doorgegeven en de batterijen zijn in orde:

- Zorg dat er niemand op de mat staat
- Zet de zendunit van UIT naar AAN.

Licht de LED twee maal op (lang-kort) dan is de mat beschadigd en dient er contact opgenomen te worden met Vahlkamp.

1. Kennismaking

U heeft zojuist het Draadloos Vloeralarm van Vahlkamp ontvangen. Bijgaand geven wij u een beknopt overzicht voor installatie en gebruik, maar eerst zetten wij voor u een aantal voordelen op een rij.

PLUSPUNTEN


Het Draadloos Vloeralarm is een gebruikersvriendelijk alarmeringsproduct dat buiten de alarmfunctie nog extra pluspunten kent:

- * Uitgebreide testmogelijkheden / batterijcontrole.
De schakelaar wordt AAN gezet: de LED licht even rood op
Er wordt contact met de mat gemaakt: de LED gaat 5 seconden rood branden
- * Overal plaatsbaar.
Het Vloeralarm is draadloos. Daardoor kan het product zeker 5 à 10 meter van het (bestaand) oproepsysteem verwijderd zijn en is dus binnen één ruimte, met in acht neming van de aangegeven afstand, overal plaatsbaar.

1.1 Onderdelen

Het draadloos Vloeralarm bestaat uit de volgende onderdelen (zie afbeelding 1):

- * Zendunit, met aan/uit-schakelaar.
- * Ontvangstunit, met 220-240 Volt adapter en kabel voor aansluiting op het oproepsysteem.
- * Vloermat, grijze mat 55 x 55 cm met kabel en plug, voorzien van antislip aan de onderzijde.

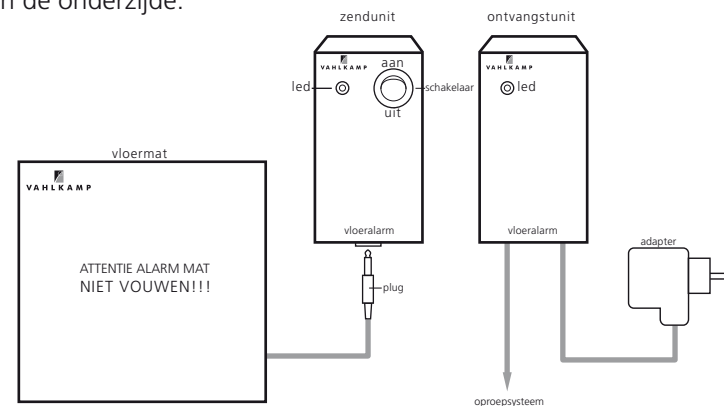

Afbeelding 1: Onderdelen Vloeralarm

Draadloos vloeralarm

2. Installatie

2.1 Ontvangstunit

Bevestig aan de grijze kabel een plug die geschikt is voor uw oproepsysteem, zoals de plug aan de peerbel of verlengde bel.

De aansluitingen van de grijze kabel zijn als volgt:

bruin:	NO
groen:	NC
wit:	COM

Voorbeeld:

Heeft uw oproepsysteem een maakcontact, sluit dan wit en bruin aan. Bij een verbreekcontact dient u wit en groen aan te sluiten.

Vervolgens dient de ontvangstunit op een vaste plaats aan de muur in de buurt van uw oproepaansluiting bevestigd te worden. Steek de adapter in een 220-240 Volt wandcontactdoos en verbind de plug met het oproepsysteem. De ontvangstunit kan nu het alarm doorgeven aan het oproepsysteem.

2.2 Zendunit

Bevestig de zendunit op de plaats waar de Vloermat neergelegd wordt. Zorg dat de schakelaar op stand UIT staat.

2.3 Vloermat

De Vloermat wordt zodanig neergelegd dat de patiënt / bewoner er niet gemakkelijk langs kan gaan staan. Verbind vervolgens de jackplug van de mat met de zendunit. Werk de kabel netjes weg, zodat eventuele valmogelijkheden zoveel mogelijk uitgesloten worden.

De installatie is compleet. Het systeem kan nu getest worden.

2.4 Testen

Het systeem dient op de volgende wijze gebruikt te worden:

Zet de zendunit AAN. De LED licht even rood op.

In ruststand is de LED van de ontvangstunit uit. Wanneer de patiënt/bewoner op de mat gaat staan licht de LED rood op, het oproepsysteem wordt geactiveerd en de LED knippert gedurende 5 seconden.

Het Vloeralarm is na het activeren van het oproepsysteem direct weer gebruiksklaar. U hoeft niets te doen om de alarmfunctie opnieuw te activeren.

N.B. Wanneer de zendunit niet gebruikt wordt dient u de schakelaar in de UIT-stand te zetten in verband met onnodig batterijverbruik.

GARANTIE

Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik van dit product. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd.

Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, breuk, vallen, demontage, brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige reparatie vallen niet onder de garantie. Batterijen vallen niet onder de garantie. In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de reparatie zal verzorgen.