



**V A H L K A M P**

**HANDLEIDING**  
multisense draadloos

**Voor meer informatie:**



**V A H L K A M P**

**Voor Nederland:**

Wilhelminalaan 1, 5707 BS Helmond  
Telefoon: 0492- 52 89 75 • Fax: 0492 - 55 36 97  
E-mail: [info@vahlkamp.nl](mailto:info@vahlkamp.nl) • Website: [www.vahlkamp.nl](http://www.vahlkamp.nl)

**Voor België:**

Postbus 61, 3960 Bree • Telefoon: 011 - 632 770




# 1. Kennismaking

## 1.1 Onderdelen


De Multisense "draadloos" bestaat uit 3 onderdelen:

- PIR Sensor
- Teleroep ontvanger
- Statief

1) De sensor wordt verticaal naast of boven het bed geplaatst zodanig dat de patient bij een geringe beweging het alarm niet af kan laten gaan (zeer gevoelig). De sensor wordt op een statief naast het bed geplaatst of anders met een houder aan de muur bevestigd. U kunt zelf proefondervindelijk bepalen wat de beste positie/plaats is daar alle omstandigheden anders zijn. Het alarm wordt aangezet met de schakelaar omlaag. Na het inschakelen zal het alarm zich ongeveer 60 seconden instellen, de groene Led knippert gedurende de insteltijd. Hierdoor is er voldoende tijd om, na installatie, de kamer te verlaten. Daarna is het alarm actief. Bij detectie zal de rode Led even oplichten.

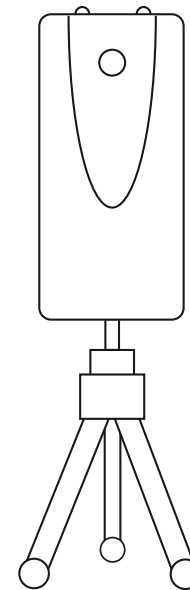

Infrarood Sensor

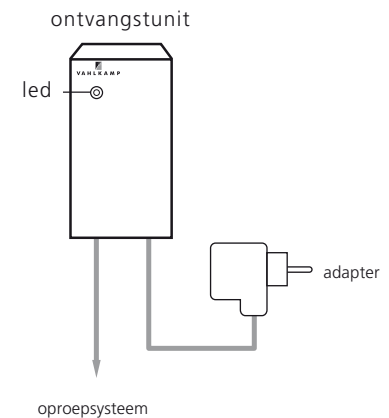

Multisense Draadloos

De Sensor is uitgerust met een niet oplaadbare batterij die ongeveer 2 à 3 jaar meegaat. Als de batterij bijna leeg is geeft de Multisense om de 5 minuten een piepsignaal en het rode Led zal gaan knipperen. De batterij is niet verkrijgbaar in de winkel, maar u kunt hem bij ons bestellen en zelf erin zetten. Ook kunt u de Multisense opsturen met de opdracht de batterij te vervangen. Het is wel van belang voor de levensduur van de batterij om de sensor uit te zetten als deze niet wordt gebruikt.

2) De ontvanger van het bedalarm, genaamd Teleroep. De verpleging kan deze ontvanger uitschakelen als zij de kamer binnenkomen. Deze moet in een straal van ongeveer 20 meter t.o.v. de sensor geplaatst worden en vervolgens aangesloten op het oproepsysteem middels de grijze kabel die uit de ontvanger komt, hiervan is de codering:

- |         |                   |
|---------|-------------------|
| - Bruin | Maakcontact       |
| - Groen | Verbrekcontact    |
| - Wit   | Gemeenschappelijk |

Er moet een passende plug voor uw oproepsysteem aan de grijze kabel worden aangesloten.

**De Multisense mag nooit geopend worden door ondeskundig personeel. Hierdoor zal de garantie vervallen.**

## **GARANTIE**

Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik van dit product. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd.

Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, breuk, vallen, demontage, brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige reparatie vallen niet onder de garantie. Batterijen vallen niet onder de garantie. In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de reparatie zal verzorgen.