



V A H L K A M P

HANDLEIDING

Stoelalarm

Voor meer informatie:



V A H L K A M P

Voor Nederland:

Wilhelminalaan 1, 5707 BS Helmond

Telefoon: 0492- 52 89 75 • Fax: 0492 - 55 36 97

E-mail: info@vahlkamp.nl • Website: www.vahlkamp.nl

Voor België:

Postbus 61, 3960 Bree • Telefoon: 011 - 632 770

GARANTIE

Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik van dit product. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd.

Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, breuk, vallen, demontage, brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige reparatie vallen niet onder de garantie.

In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de reparatie zal verzorgen.

STORINGSWIJZER.

Opmerking:

Belangrijk is dat de Stoelmat niet gevouwen wordt ook bij verstelbare stoelen dient daar rekening mee gehouden te worden.

Situatieschetsen

Wij geven in enkele situatieschetsen weer wat er aan de hand kan zijn bij het niet of slechts gedeeltelijk functioneren van het Stoelalarm.

In alle andere gevallen raden wij aan om contact op te nemen met Vahlkamp, tel. 0492-528975.

Controleer echter bij niet functioneren eerst of de pluggen goed bevestigd zijn, de schakelaar op de AAN-stand staat en de led groen brandt.

Doorloop de volgende punten als alles correct aangesloten is:

Er wordt geen alarmsignaal doorgegeven terwijl de groene led brand :

Zorg dat de stoel onbezet is

Zet de zendunit van UIT naar AAN.

Dooft de led niet bij het activeren van de Stoelmat,

dan is de stoelmat beschadigd. Neem contact op met Vahlkamp.

1. Kennismaking

Zojuist is het Stoelalarm van Vahlkamp in ontvangst genomen. Bijgaand geven wij een overzicht voor installatie en gebruik, maar eerst zetten wij een aantal voordelen op een rij.

PLUSPUNTEN

Behalve het hoofddoel, het alarmeren via het (bestaande) oproepsysteem indien de stoel verlaten wordt, kent het Stoelalarm de volgende pluspunten:

Instelmogelijkheid tijd.

De intervaltijd tussen het verlaten van de stoel en het doorgeven van het signaal aan het (bestaande) oproepsysteem is instelbaar. Deze intervaltijd kent een keuzemogelijkheid tussen direct, 5sec, 10sec, 30sec, 1min, 5min, 15min.


Uitgebreide testmogelijkheid.

De schakelaar wordt AAN gezet: LED licht even rood op en wordt vervolgens groen. Als er contact gemaakt wordt met de stoelmat dan dooft de LED even, ter controle. Als het contact met de stoelmat wordt verbroken dan gaat de LED gedurende 2 seconden rood branden, ter indicatie dat er alarm gemaakt wordt. Kortom: er is een controlemogelijkheid of de activiteit bij de mat wordt gedetecteerd door de ontvangstunit en U kunt controleren of de ontvangstunit stand-by staat.

1.1 Onderdelen

Het bestaat uit de volgende onderdelen (zie afbeelding 1):

- Ontvangstunit, met aan/uit -schakelaar en instelknop voor de tijd, 220 Volt adapter en kabel voor aansluiting op het (bestaande) oproepsysteem
- Stoelmat, grijs, 25x25 cm- voor in de stoel, met kabel en plug.

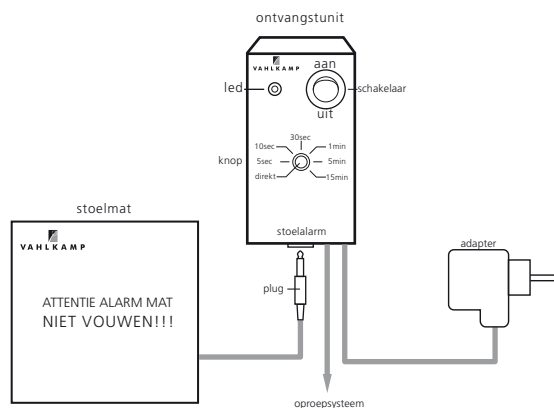

Afbeelding 1: Onderdelen Stoelalarm met mat

2. Installatie

2.1 Ontvangstunit

Bevestig aan de grijze kabel een plug die geschikt is voor uw (bestaande) oproepsysteem, zoals de plug aan de peerbel of verlengde bel.

De aansluitingen van de grijze kabel zijn als volgt:

- bruin: NO
- groen: NC
- wit: COM

Voorbeeld:

Heeft uw (bestaande) oproepsysteem een maakcontact, sluit dan wit en bruin aan. Bij een verbreekcontact dient u wit en groen aan te sluiten.

Steek de adapter in een 220 Volt wandcontactdoos en verbindt de plug met het (bestaande) oproepsysteem. De ontvangstunit kan nu het alarm doorgeven aan het oproepsysteem.

2.2 Stoelmat

De Stoelmat dient zodanig bij de patiënt/bewoner op de zitting gelegd te worden, dat de gebruiker er in het midden op zit. Verbindt vervolgens de jackplug van de mat met de ontvangstunit. Werk de kabel weg zodat de mat geen belemmering vormt wanneer de stoel verplaatst wordt.

De installatie is nu compleet. Het systeem kan zodra alles aangesloten is getest worden. Doorloop hiervoor de stappen zoals aangegeven bij "testen"

2.3 Testen

Het systeem dient op de volgende wijze in gebruik genomen te worden:

Stel de gewenste intervaltijd in. Houdt er rekening mee dat bij gebruik van de directstand het (bestaande) oproepsysteem direct wordt geactiveerd. Wordt deze stand gebruikt bij een patiënt/bewoner die veelvuldig beweegt dan bestaat de mogelijkheid dat het (bestaande) oproepsysteem te vaak in werking treedt waardoor een zekere onoplettendheid kan ontstaan.

Zet de zendunit AAN. LED licht even rood op en wordt vervolgens groen.

Wanneer de patiënt/bewoner de stoel verlaat dooft de LED even. Na het verstrijken van de ingestelde tijd wordt het (bestaande) oproepsysteem geactiveerd en wordt de LED rood gedurende 2 seconden.

Het Stoelalarm is na het activeren van het (bestaande) oproepsysteem, direct weer gebruiksklaar. Er hoeft verder niets gedaan te worden om de alarmfunctie opnieuw te activeren.